



Medicine Dropper

Instructions:

1. Remove spill guard plug from dropper tip.
2. Squeeze air out of dropper.
3. Insert dropper into medicine bottle and slowly release pressure on bulb until medicine reaches desired dosage marking.
4. Remove dropper from medicine bottle and tip upside down while securing spill guard over dropper tip.
5. Administer medicine while child is upright.
6. Remove spill guard and point tip of dropper to inside of cheek and gently squeeze bulb.

To Clean: Before first use, wash with warm, soapy water and rinse thoroughly. Repeat after administering each dosage.

CAUTION: This product is not a toy. Do not allow children to play with it.

Compte-gouttes pour médicament

Instructions:

1. Retirez le bouchon au bout du compte-gouttes.
2. Faites sortir l'air du compte-gouttes en le pressant.
3. Insérez le compte-gouttes dans la bouteille de médicament et lentement relâchez la pression sur l'ampoule jusqu'à ce que la dose désirée soit atteinte.
4. Enlevez le compte-gouttes de la bouteille de médicament et inclinez-le à l'envers en plaçant le bouchon sur le bout.
5. Administrez le médicament pendant que l'enfant se tient droit.
6. Enlevez le bouchon et pointez le bout du compte-gouttes vers l'intérieur de la joue et pressez doucement l'ampoule.

Pour nettoyer: Avant chaque utilisation, lavez avec de l'eau tiède savonneuse et rincez à fond. Répétez après avoir administré chaque dose de médicament.

ATTENTION : Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec.

