



Easy Fill Medicine Syringe - Instructions:

1. Insert syringe tip into medicine.
2. Draw back plunger slowly until medicine reaches prescribed dose.
3. Insert the tip of the dispenser into your child's mouth, pointing towards the cheek.
4. Gently push plunger to release medicine. Be sure to push slowly so your child can comfortably swallow the liquid. Pause and repeat if necessary.

To Clean:

Wash all parts separately in warm, soapy water and rinse thoroughly before and after each use.

CAUTION:

This product is not a toy. Do not allow children to play with it. When not in use, keep out of reach of children. Keep all medications out of children's reach. We recommend that you use a child restraint top to seal the medicine bottle and store it in a locked cabinet or other location that is not accessible to a child.

Seringue médicale facile à remplir - Instructions:

1. Insérez l'extrémité de la seringue dans le médicament.
2. Retirez lentement le piston jusqu'à ce que le médicament atteigne la dose prescrite.
3. Insérez l'extrémité du distributeur dans la bouche de votre enfant, en pointant vers la joue.
4. Poussez doucement sur le piston pour faire couler le médicament. Assurez-vous de pousser lentement pour permettre à votre enfant d'avaler confortablement le liquide. Faire une pause et répétez si nécessaire.

Pour nettoyer:

Lavez toutes les pièces séparément dans de l'eau tiède savonneuse et rincez à fond avant et après chaque utilisation.

ATTENTION:

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec. Gardez hors de la portée des enfants quand il n'est pas utilisé. Gardez tous les médicaments hors de la portée des enfants. Nous recommandons que vous utilisiez un dessus à l'épreuve des enfants pour sceller la bouteille de médicament et la ranger dans une pharmacie verrouillée ou tout autre endroit qui n'est pas accessible à un enfant.

©2007 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved.
www.djgusa.com (800) 544-1108 www.safety1st.com
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.
Styles and colors may vary.
Les styles et couleurs peuvent varier.
Distributed by (distribué par)
Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada,
873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
06/07

